


Инструкция по сборке кушетки медицинской смотровой

1. Совместить раму и стойки, как показано на рисунке.
2. Согнуть зажимы по перфорации до совпадения отверстий.
3. Закрепить стойки на раме с помощью болтов М6х16 и гаек М6.

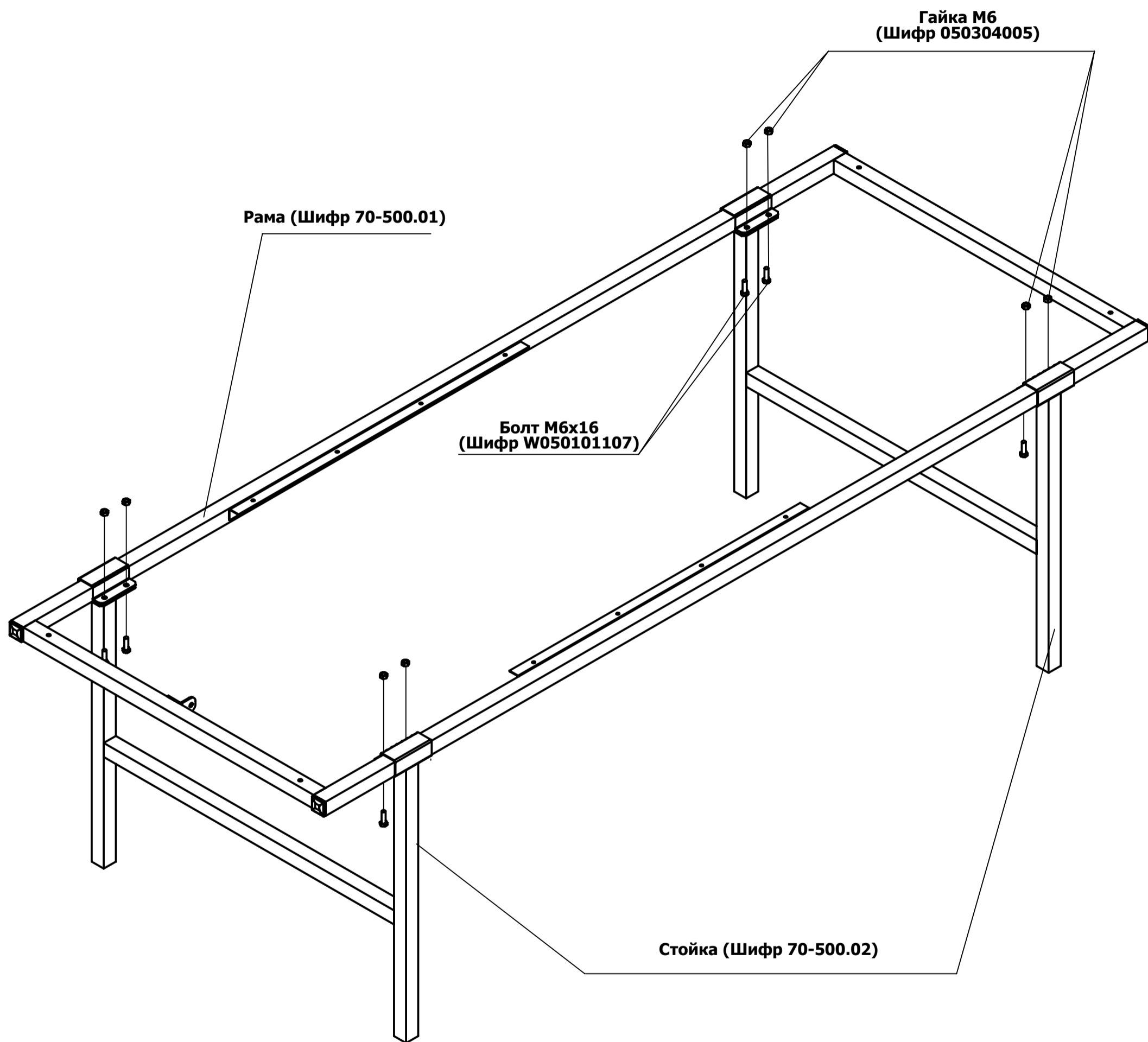

2. Установите механизм регулировки угла наклона подголовника "Ростомат".
Для его установки используйте болты М6х16, дистанционные шайбы(2 шт.) и гайки М6.

3. Закрепите ложе на раме, используя шурупы 4.2х13.

